

犬糸状虫症診断用キット キャナイン-フィラリア・キット結果判定

- (1) 10分以内にコントロールライン、テストラインがともに検出されれば陽性です。
- (2) 10分以内にコントロールラインよりもテストラインが薄くても検出されれば陽性です。
- (3) 全血及び血清、血漿でも使用できます。
- (4) 血液試料は抗凝固阻止剤（EDTA、ヘパリン、クエン酸塩）の使用が可能です。
- (5) 溶血した血液試料を使用した場合、背景が赤くなり、なおかつ小数寄生で抗原量が少ない時はテストラインが薄くなり判定しづらくなる場合があります。従って判定しにくい場合は新しい血液試料を用いて再試験を行って下さい。



血清試料を使用した場合



陽性
(+)



陽性
(+)



陰性
(-)

全血試料を使用した場合



陽性
(+)



陽性
(+)



陰性
(-)


全血溶血試料を使用した場合



陽性
(+)



陽性
(+)

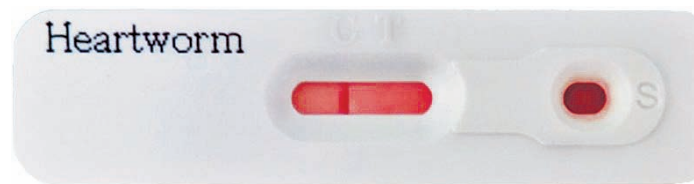

陰性
(-)

